


Anleitung Corona Schnelltest

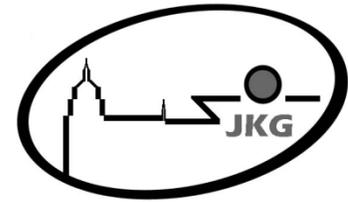

Schritt 1: Vorbereitung

Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt an seinen Platz:
Röhrchen, passender Deckel, Testkassette, Wattestäbchen




Schritt 2: Pufferlösung in das Röhrchen

Die Lehrkraft und/oder auch eine verantwortungsvolle Schülerin*) gehen von Platz zu Platz und füllen Pufferlösung bis zur Markierung in die Röhrchen.

Schritt 3: Schnäuzen und Abstrich erfolgt draußen

Alle gehen mit 1. dem gefüllten und verschlossenen Röhrchen sowie 2. dem Wattestäbchen und 3. einem Taschentuch ins Freie und halten ausreichend Abstand voneinander. Dort wird zunächst die Nase geputzt (um eine eventuell vorhandene Virenlast nach vorne zu holen), wobei die Nase ausnahmsweise nicht vollständig abgewischt wird.

Nun mit dem Wattestäbchen fünfmal pro Nasenloch hin- und her und rundherum den Abstrich nehmen (ca. 2cm tief in der Nase).

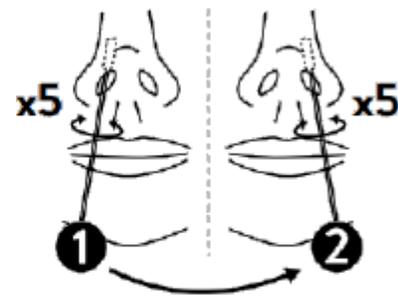

Schritt 4: Abstrich in das Röhrchen (immer noch draußen)

Das Wattestäbchen in das Röhrchen und dort in der Pufferlösung schwenken und am Boden und Rand unten ausdrücken. Das Wattestäbchen im Röhrchen belassen und an der Sollbruchstelle (Kerbe) abbrechen, so dass das Röhrchen wieder zugeschraubt werden kann.

Schritt 5: Flüssigkeit auf Testkassette geben


Wieder zurück am Platz im Unterrichtsraum (mit Maske) die untere Kappe des Röhrchens entfernen und fünf Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette geben. Das Röhrchen wieder zuschrauben. Wenn sich der Teststreifen in der Testkassette nach 1 Minute noch nicht zu verfärben beginnt, nach Anleitung der Lehrkraft noch 2 bis 3 Tropfen nachtropfen.

*) Es darf auch ein verantwortungsvoller Schüler sein.

Schritt 6: Auswertung

Nach den genannten **15 Minuten** kann das Ergebnis direkt abgelesen werden (C=Kontrolllinie, T=Testlinie).

- Strich nur bei C: Test ist negativ, also keine Infektion
- Strich bei C & T: Test ist positiv; siehe Maßnahmen unten
- Strich nur bei T: Testergebnis ungültig; zurück zu Schritt 1
- Keine Striche: Testergebnis ist ungültig; zurück zu Schritt 1

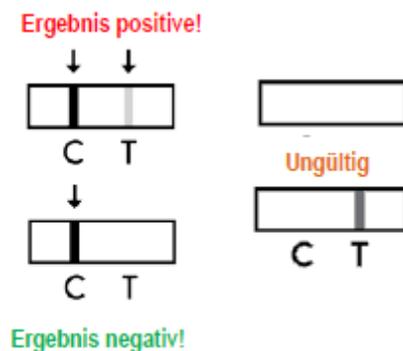

Maßnahmen bei negativem Testergebnis

Der Verpackungsmüll wird getrennt nach Papier und Wertstoffen (Plastik) unserem Müllkonzept gemäß entsorgt. Das Röhrchen und die Testkassette kommen in den Restmüll.

Maßnahmen bei positivem Testergebnis

Es ist möglich, dass der Schnelltest falsch positiv ist, also keine Infektion vorliegt – das muss jetzt allerdings geprüft werden. Dazu bitte zunächst ein Foto der Testkassette machen und die Testkassette sowie die getestete Person zur Schulleitung begleiten. Diese wiederum informiert das Gesundheitsamt und kümmert sich um alles Weitere.

Zur Information: Bei positivem Testergebnis bitte eine Ärztin oder einen Arzt Ihrer Wahl verständigen, damit ein PCR-Test zur Absicherung gemacht werden kann. Bis zum Erhalt des negativen PCR-Ergebnisses müssen sich positiv schnellgetestete Personen in Quarantäne begeben.

Dr. Rolf Bayer

Stand: 12.3.2021